

### Surfa'safe Premium Anios - Spray 750 ml

Mousse détergente désinfectante pour toutes les surfaces, équipements, dispositifs médicaux et surfaces alimentaires.

- Solution prête à l'emploi.
- **Bactéricide** en 3 min, 20°C : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561
- **Levuricide** en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.

Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus

#### Mode d'emploi :

S'utilise sans dilution. Appliquez la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Il est nécessaire de bien répartir le produit. Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Parfum agrume très odorant.

**Composition** : Chlorure de didécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients

Livré en Flacon de 750 ml avec pistolet mousser.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

