

## FICHE TECHNIQUE



### Nettoyant désinfectant toutes surfaces et milieu médical - EN 14476 Robemed- 750ml

Virucide, bactéricide, fongicide, sans javel. (Virus enveloppé lipidique : coronavirus, influenza, hépatite B et hépatite C)

Produit biocide pour le nettoyage et la désinfection au quotidien de toutes surfaces, y compris les surfaces extérieures de dispositifs médicaux non critiques tels que mobiliers, tables, divans, gueris, matériels de diagnostic.

Élimine 99.9% des bactéries et virus. Sans alcool.

- Effet détergent puissant et anti-tâche
- Propriétés microbiologiques : virucide, bactéricide et fongicide
- Non corrosif sur plastiques, métaux et selleries
- Sans odeur
- Ne laisse pas de traces
- Agent tensioactif
- Léger effet moussant
- Efficace sur les traces de doigt
- Désincruste en profondeur

#### Propriétés microbiologiques :

- Virucide selon **EN14476 - Virus enveloppés: Coronavirus**, Influenza (grippe), Hepatite B et C
- Bactéricide selon **EN1276, EN13697**- en condition de saleté: Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurim.
- Fongicide selon **EN1650** : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

Bactéricide : EN1276 - en conditions de saleté : **5 min**

Bactéricide : EN13697 - en conditions de saleté : **5 min**

Fongicide : EN1650 - en conditions de saleté : **15 min**

Virucide : EN14476 - en conditions de saleté - virus d'une enveloppe lipidique : **1 min**

#### Agent désinfectant :

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium : 0,30% (CAS n°7173-51-5)

Produit fabriqué en Europe

#### Utilisation :

Par pulvérisation à 20 cm des surfaces et des équipements, textiles exclus.

Nettoyer avec un chiffon propre et humide.

Ne pas rincer, sauf pour les surfaces en contact avec les aliments ou les animaux, après

#### Précautions :

Ce produit n'est pas destiné à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

#### À quoi correspondent les indications TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 et TP18 ?

TP1 : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique.

TP3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.

TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments.

TP5 : Désinfectants pour eaux de boisson.

TP18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

Fabriqué en europe.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informa*